

## Uso del teclado PC o RehaCom


### Descripción

- Cada módulo de terapia está optimizado para ser usado con el teclado de los pacientes de **RehaCom**. Este teclado especial es grande, robusto, fácil de manejar y entender. Así que cada paciente, incluso con severos déficits cognitivos o motores puede ser tratado con el **RehaCom**.

Un teclado normal de PC puede ser usado con los siguientes mapas. Un juego de pegatinas autoadhesivas está disponible en **RehaCom** para marcar el teclado de su PC.

**Nota:** Para poder entrenar el **RehaCom** asegúrese de que el teclado o el dongle (contador de licencias) del paciente estén conectados a su computadora.



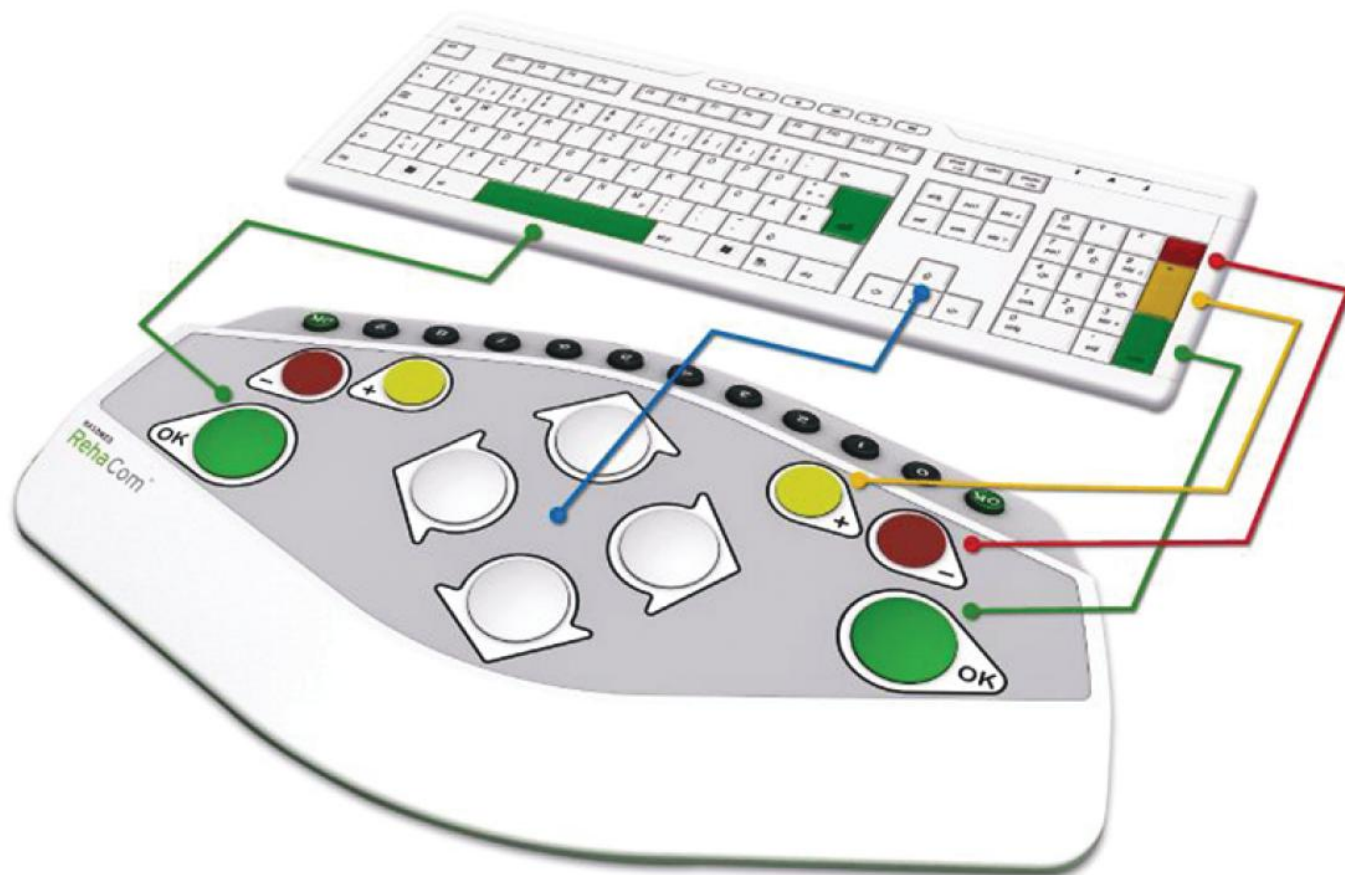

## Teclado RehaCom

## Teclado de PC

Botones "OK"	Izquierda = barra espaciadora Derecha = retorno; clic del ratón
Botones de "Flecha"	Teclas de cursor
Botones "Menos"	Tecla "menos" en el teclado numérico
Botones "Más"	Tecla "más" en el teclado numérico
Botones numéricos del 0 al 9	Teclas numéricas



+562 24459340

@doctorchoicechile

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl @doctorschoice\_chile